

PROFESIONALUS SANITIZATORIUS ĮRANKIŲ DEZINFEKCIJAI UV-C GERMIX
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA



**GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
PALIKTI VEIKIANTĮ
PRIETAISĄ BE PRIEŽIŪROS !**

Šis aparatas, skirtas kosmetologinėms procedūroms, kurias atlieka tinkamą išsilavinimą pagal LR įstatymus turintys kosmetologai arba gydytojai.

Prietaisas skirtas tik komerciniam naudojimui.

Prietaisas nėra skirtas naudoti namų sąlygomis.

Prietaisas nėra skirtas naudoti ne pagal šioje instrukcijoje aprašytas taisykles.



Visa medžiaga pateikta šiame dokumente yra www.salonams.eu nuosavybė.
Kopijuoti, platinti be www.salonams.eu sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
Intelektinė nuosavybė apsaugota LR įstatymais.

Sanitizatorius efektyviai sunaikina bakterijas be šilumos ar cheminių medžiagų naudojimo. UV sanitizatoriumi yra paprasta naudotis ir gauti maksimalų rezultatą. Tinkamas dezinfekuoti plastikinius ir metalinius įrankius. Dezinfekcijos efektyvumas yra 95%.

DĖMESIO:

1. Prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją.
2. Tinklo įtampa turi būti suderinama su prietaisu.
3. Nežiūrėkite ilgai į UV lempą, tai gali sukelti diskomfortą, akies tinklainės pažeidimus.
4. Nebandykite naudoti šio prietaiso akims ar odai, nekiškite rankų į veikiantį prietaisą.
5. Laikykite prietaisą toliau nuo vaikų.
6. Šį prietaisą draudžiama plauti ar mirkyti.
7. Kai prietaisas nenaudojamas, prašome jį išjungti – taupykite energiją.
8. Laikiklis pagamintas iš šviesai jautrių medžiagų, priklausomai nuo ultravioletinės šviesos, gali pasikeisti spalva. Į pradinę spalvą grįš po švytėjimo.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Prietaiso modelis:	GERMIX	Prietaiso išmatavimai:	40*24*19 cm
Prietaiso galia:	8 W	Sterilizacinės lentynos išmatavimai:	31*20*10 cm
El. maitinimas:	220 V	Prietaiso svoris:	2 kg.

BŪDINGOS SAVYBĖS:

- UV-C technologija saugi įrankiams
- Tinka tokių įrankių dezinfekcijai: kirpėjų šepėčiai, makiažo šepetėliai, šukos ir aukštai temperatūrai bei cheminėms medžiagoms jautriems įrankiams dezinfekuoti.
- Dezinfekcijos laikas yra apie 30-45 min.

Produkto paskirtis: skirtas grožio salonų, kirpyklų, kosmetologų ir kitų grožio industrijos meistrų instrumentams sanituoti naudojant ultravioletinius šviesos spindulius.

NAUDOJIMAS:

1. Prieš naudodami įsitinkinkite, kad tinklo įtampa yra teisinga ir sutampa su nurodyta prietaiso duomenų lentelėje.
2. Dezinfekuotinus instrumentus (sausus) įdėkite į sterilizatoriaus vidų.
3. Uždarykite stalčių ir pagrindiniu jungikliu įjunkite įrenginį. UV lempų įjungimas reiškia pasirengimą darbui.
4. Nežiūrėkite tiesiai į UV lempas.
5. Kai prietaisas nenaudojamas, jį būtina atjungti nuo maitinimo šaltinio.



Visa medžiaga pateikta šiame dokumente yra www.salonams.eu nuosavybė. Kopijuoti, platinti be www.salonams.eu sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. Intelektinė nuosavybė apsaugota LR įstatymais.

BENDROS ATSARGUMO PRIEMONĖS IR TAISYKLĖS

100-1). Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui grožio salonuose, specializuotuose kabinetuose. Prietaisas gali būti taisomas ir remontuojamas tik kvalifikuotų specialistų pagalba. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų procedūrų metu DRAUDŽIAMA remontuoti arba bandyti remontuoti prietaisą pačiam. Draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams, negu yra išvardinta šio prietaiso aprašyme.

100-2). Šio prietaiso garantinis remontas gali būti atliekamas tik platintojo pagalba. T.y. prietaisui sugedus, prietaisas turi būti pristatytas taisymui į platintojo biurą.

100-3). Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia skysčių kurie gali pratekėti, drėgnose patalpose arba drėgnomis rankomis. Skystis neturi patekti ant šio prietaiso. Skysčiui patekus ant šio prietaiso nedelsiant ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

100-4). Ištraukti maitinimo laidą iš elektros tinklo būtina ir šiais atvejais:

- a). Prietaisas skleidžia keistą kvapą, leidžia keistus garsus, dūmina;
- b). Pažeistas maitinimo laidas;
- c). Prietaisas nukrito arba yra pažeistas jo korpusas.

100-5). Nedėkite ant šio prietaiso jokių daiktų. Nelaikykite ir nesinaudokite prietaisu tokiose vietose, kuriose ant jo gali būti užminta arba gali būti pažeistas jo laidas.

100-6). Saugumo sumetimais kiekvieną kartą baigus naudotis prietaisu ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros tinklo.

100-7). Negalima nieko dėti/grūsti/kišti į prietaiso angas. Patekus pašaliniam daiktui į prietaiso vidų skubiai ištraukite prietaiso laidą iš elektros tinklo ir susisieki su garantinio aptarnavimo įmone arba Pardavėju.

100-8). Nedėkite, nelaikykite, nesinaudokite prietaisu ant nestabilių lentynų, stalų, kitų paviršių. Didelė tikimybė, kad prietaisui nukritus gali atsirasti korpuso defektai.

100-9). Nedėkite, nelaikykite, nesinaudokite prietaisu ant vibruojančių paviršių.

100-10). Siekiant prailginti prietaiso veikimo laiką, neskubėkite tuoj pat įjungti/išjungti jungiklio. Tarp šio mygtuko paspaudimo palikite bent 30 sekundžių tarpą.

100-11). Siekiant prailginti prietaiso veikimo laiką, neskubėkite tuoj pat įjungti prietaisą, jeigu jis yra atneštas iš šaltos aplinkos ir yra sušalęs. Leiskite prietaisui bent (1) vieną valandą adaptuotis kambario temperatūroje.

100-12). Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, įsitinkite, kad įtampa elektros tinkle sutampa su rekomenduojama prietaisui įtampa. Kitu atveju, prietaisas gali sudegti.

100-13). Draudžiama kratyti prietaisą. Nukritęs prietaisas arba jo dalys praranda garantinio aptarnavimo statusą.

100-14). Jeigu prietaisas turi ventiliacines angas, būtina užtikrinti laisvą bent 10 centimetrų atstumą iki šių ventiliacinių angų. Tai svarbi kokybiško prietaiso veikimo sąlyga.

100-15). Jeigu prietaisas turi liečiamą ekraną, draudžiamą šį ekraną spaudinėti aštriais daiktais (pvz. adatos, smailūs metaliniai daiktai, tušinukai, pieštukai, **dirbtiniai nagai**). Jeigu garantinio aptarnavimo metu paaiškės, kad minkštasis vidinis ekrano sluoksnis yra pažeistas – prietaisas praras garantinio aptarnavimo statusą.

100-16). PRIMENAME, KAD: prietaiso laidai, plastikinės, plastmasinės, stiklinės ir kitos dūžtančios dalys nėra garantinio aptarnavimo objektas ir jiems nėra taikoma garantija. Pirkėjas keičia šias prietaiso dalis pats savo sąskaita.

100-17). PRIMENAME, KAD: keičiamos, bet kokio tipo lempuotės nėra garantinio aptarnavimo



SALONAMS.EU



3 | Page
Visa medžiaga pateikta šiame dokumente yra www.salonams.eu nuosavybė.
Kopijuoti, platinti be www.salonams.eu sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
Intelektinė nuosavybė apsaugota LR įstatymais.

objektas ir jiems nėra taikoma garantija. Pirkėjas keičia šias prietaiso dalis pats savo sąskaita. 100-18). PRIMENAME, KAD: adapteriai, prietaiso įkrovimo blokeliai, ličio baterijos turi tik 6 mėnesių garantiją.

DĖMESIO:

100-19). Prietaisu griežtai draudžiama naudotis vaikams iki 18 metų, ir senyvo amžiaus žmonėms su sulėtėjusia reakcija. Taip pat šiuo prietaisu draudžiama naudotis žmonėms, kurie nieko neišmano/nežino apie šį prietaisą.

100-20). Šis prietaisas nėra žaislas vaikams. Vaikams draudžiama naudotis arba žaisti su šiuo prietaisu.

100-21). Nepalikite vienu vaikų ar senyvo amžiaus žmonių vienu patalpose be priežiūros su šiuo prietaisu.

100-22). Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Neteisingas šio prietaiso naudojimas ar kontaktas su kitais elektriniais veikiančiais prietaisais gali baigtis mirtimi, rimtais sveikatos sužalojimais. Štai kodėl prietaisą būtina saugoti ir slėpti toliau nuo vaikų, neleisti jiems net ir trumpam žaisti su šiuo įrenginiu.

PRIETAISO UTILIZAVIMAS

100-23). Pasibaigus prietaiso gyvavimo laikui, visos jo detalės turi būti utilizuojamos laikantis tos šalies teisinių normų, kuriose prietaisas buvo naudojamas. Jokiu būdu neišmeskite naudoto prietaiso į bendrą atliekų konteinerį. Prašome vadovautis utilizavimo taisyklėmis skirtomis šios rūšies prietaisams. Siekiant tausoti aplinką remkitės ES direktyva 2012/19 EC „dėl naudotų elektroninių ir elektrinių prietaisų surinkimo, saugojimo ir transportavimo į surinkimo/supirkimo taškus perdirbimui.

PRIETAISO SAUGOJIMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS

100-24). Šis prietaisas turi būti saugomas ir transportuojamas originalioje pakuotėje, nuo -10 iki +50 laipsnių temperatūroje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, esant ne didesniai negu 55 % drėgnumui. Rekomenduojama naudotis prietaisu temperatūra patalpose yra nuo +10 iki +40 laipsnių. Saugojimo ir transportavimo metu nekratykite prietaiso, nedaužykite. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių, stiprių bei staigių atmosferos/temperatūros pokyčių.

PRIETAISO DEZINFEKCIJA

100-25). Prietaiso korpusas gali būti dezinfekuojamas medvilniniu tamponu, suvilgytu tinkamu dezinfekcijos skysčiu. Suvilgytas reiškia: vos drėgnas (keli lašai arba 1-2 papurškimai dezinfekciniu skysčiu).

Jokiu būdu nevalykite prietaiso kol jis neatvėso.

100-26). Jokiu būdu nevalykite prietaiso korpuso abrazyviniais šveitikliais, dezinfekcijos koncentratais, agresyviomis dezinfekcijos priemonėmis (pvz. ADK-611) arba šiurkščiomis šluostėmis.

Jokiu būdu nevalykite prietaiso neišjungus maitinimo laido iš elektros tinklo.

100-27). Jeigu reikia išvalyti arba dezinfekuoti ilgą, rankai nepasiekiamą kolbą arba skysčių talpą, tuomet naudokite dezinfekcijos priemone suvilgytas specialias šluostes stiklinių plovimui (šluostės arba kempinės ilgu kotu).

Liečiamųjų ekranų priežiūra: kaip saugiai juos nuvalyti?



Visa medžiaga pateikta šiame dokumente yra www.salonams.eu nuosavybė. Kopijuoti, platinti be www.salonams.eu sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA. Intelektinė nuosavybė apsaugota LR įstatymais.

100-28). Liečiamieji ekranai turi savybę kaupti dulkes. Šie prietaisai yra labai jautrūs, todėl net ir menka klaida gali padaryti daug papildomų problemų. Visgi, jei vadovausitės keliais papras-tais patarimais, šią užduotį atliksite saugiai ir efektyviai.

Visuomet valykite tik išjungtus įrenginius

100-29). Šia taisykle pravartu pasikliauti dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, ant tamsaus, išjungto ekrano kur kas geriau matysis susikaupusios dulkės ar kiti nešvarumai, todėl Jūsų darbas bus tikslingesnis ir sėkmingesnis.

Rinkitės kokybiškus ir švelnius audinius

100-30). Jei nenorite, kad prietaiso ekranas po įprasto valymo pasipuoštų įbrėžimais, venkite popierinių rankšluosčių ar tualetinio popieriaus – nors žalos iš karto galite nepastebėti, laikui bėgant ji tik didės. Šiems jautriems ekranams geriausiai tinka itin švelnūs audiniai, pavyzdžiui, mikropluošto šluostės – naudojant jas, tikrai neteks nerimauti dėl galimų įbrėžimų.

Nenaudokite jėgos

100-31). Net ir tuomet, jei ekranas atrodo pakankamai tvirtas, valymui nereikėtų naudoti jėgos – tikėtina, jog stipriau patrynę nešvarias vietas, geresnių rezultatų nepasieksite, tačiau turėsite kur kas didesnių nuostolių. Stiprūs paspaudimai gali sunaikinti ekrano pikselius, o pačiame ek-rane gali likti pakankamai ryškūs įspaudai – jei kalbėsime apie vaizdo stebėjimo patirtį, jie tikrai netaps privalumu.

Venkite cheminių valiklių

100–32). Tam, kad kokybiškai nuvalytumėte ekranus, galima pasitelkti buityje naudojamas priemones: itin dažnai rekomenduojama išbandyti distiliuoto vandens ir baltojo acto mišinį. Tačiau jei nuspręsite rinktis kitas priemones, atidžiai perskaitykite jų sudėtį: joje neturėtų būti amoniako, etilo (ar kito stipraus) alkoholio, acetono arba etilacetato. Šios cheminės medžiagos gali neigiamai paveikti ar net nepataisomai sugadinti ekrano dangą, todėl verčiau nerizikuoti.

Nepurškite valiklių tiesiai ant ekrano

100-33). Nesvarbu, kokią valymo priemonę nuspręsite pasirinkti, niekuomet nepurškite jos tiesiai ant įrenginio ekrano – skystis labai greit gali nutekėti į prietaisą ir nepataisomai jį suga-dinti. Pirmiausia juo suvilgykite audinį ir tik tuomet imkitės darbo.



SALONAMS.EU



Visa medžiaga pateikta šiame dokumente yra www.salonams.eu nuosavybė.
Kopijuoti, platinti be www.salonams.eu sutikimo GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
Intelektinė nuosavybė apsaugota LR įstatymais.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: KEYS21031708005EM-02

Applicant : GUANGZHOU YORKMA INDUSTRIAL CO.,LTD
Address : No.7shiding road,yahu village,renhe town,baiyundistrict, Guangzhou ,china
GUANGZHOU YORKMA INDUSTRIAL CO.,LTD
Manufacturer : No.7shiding road,yahu village,renhe town,baiyundistrict, Guangzhou ,china
Address : N/A
UV STERILIZER
Trade mark : YM-9013,YM-9007,YM-9001,YM-9006,YM-9003,YM-9002, SM-001, SM-001DUAL
Product :
Model No. :

EMC Directive - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s) EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Dongguan KEYS Testing Technology Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directives are applicable.



Date: Mar.24,2021

Dongguan KEYS Testing Technology Co., Ltd.

6 / f, Building B, Chuangyigu Industrial Park, No.5 Hehe Street, Songxi Road, Hengkeng, Liaobu, Dongguan City

Tel:+ 86-0769-89798319

<http://www.keys-lab.com> E-mail: info@keys-lab.com