

schülke -†



rotasept®

rotasept® – tai naudoti parengtas tirpalas, skirtas sukijų instrumentų dezinfekavimo ir valymo reikmėms

Privalumai

- Visapusiškai veiksmingas
- Puikiai pritaikytas naudoti ultragarsinėje vonelėje
- Be aldehidų
- Parengtas naudoti

Taikymo sritys

Grąžtų, pjoviklių, deimantinių šlifuoiklių ir kitų sukijų tikslųjų prietaisų valymo bei dezinfekavimo rankiniu būdu reikmėms. Dėl puikių tinkamumo savybių ir visapusiško veiksmingumo, „rotasept®“ pasižymi visomis svarbiomis produkto, skirto sukiesiems tiksliesiems instrumentams perdirbti, savybėmis.

Naudojimo instrukcija

„rotasept®“ yra parengtas naudoti produktas, todėl į grąžto vonelę pilamas neskiestas. Kiekvieną nedidelį sukijų instrumentą iš karto po naudojimo pamerkite į grąžto vonelėje esantį tirpalą, kad ant paviršiaus nepridžiūtų nešvarumai.

Siekiant išvengti rūdžių susidarymo, pašalinę „rotasept®“ instrumentų vandeniu neplaukite. Pasinaudodami žnyplėmis perkelti instrumentus ant celiuliozės servetėlės ir **palikite išdžiūti**. Jei reikia, nuvalykite įsisenėjusius nešvarumus ir procedūrą kartokite. Jei reikia atlikti grąžto sterilizavimą, „rotasept®“ sluoksnį reikia nuplauti, o instrumentą išdžiovinti.

Panardinimo trukmė: 15 minučių. Venkite ilgesnės dezinfekavimo trukmės. Darbinius tirpalus keiskite kiekvieną darbo dieną ir tik tuo atveju, jei tarša aiškiai matoma. Nemaišykite kartu su valymo ir dezinfekavimo priemonėmis. Laikykitės instrumento gamintojų nurodytų perdirbimo rekomendacijų.

Medžiagų tinkamumas

Šarmams ir alkoholiui jautraus plastiko, aliuminių dalių ir instrumentų, pagamintų sintetinių dervos klijų pagrindu, merkti į „rotasept®“ tirpalą negalima. Su šiais instrumentais rekomenduojame naudoti „gigasept® instru AF“ ir (arba) „gigasonic®“ priemones.

Ultragarsinė vonelė

„rotasept®“ itin tinkamas naudoti ultragarsinėje vonelėje.

Mikrobiologinis veiksmingumas

| Veiksmingumas | Koncentracija | Sąlyčio trukmė |
|---|------------------|----------------|
| Baktericidinis EN13727, EN14561, pagal VAH – nešvari aplinka | parengta naudoti | 5 min. |
| Mikobaktericidinis EN14348, En 14563, pagal VAH – nešvari aplinka | parengta naudoti | 15 min. |
| Levurocidinis EN13624, En 14562, pagal VAH – nešvari aplinka | parengta naudoti | 5 min. |
| Virucidinis EN14476 – nešvari aplinka | parengta naudoti | 30 sek. |

Sertifikatai

- VAH sertifikatas



CE 0297



Produkto duomenys

Sudėtis

100 g rotasept® tirpale yra: 1,6 g kalio hidroksido, 10,0 g propan-2-olio, 0,1 g 2-etilheksanolio.

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004: < 5 % nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos.

Cheminės fizinės savybės

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Spalva | Bespalvės |
| Tankis | Apie < 1,00 g/cm ³ / 20 °C |
| Pliūpsnio temperatūra | 36 °C / metodas: DIN 51755, 1 dalis |
| Forma | Skysta |
| pH | 13,7 / 20 °C |

Specialios rekomendacijos

Prieš naudodami visada perskaitykite, kas rašoma ant etiketės ir produkto informacijos dokumente.

- Nelaikykite aukštesnėje kaip kambario temperatūroje.
- Pasibaigus galiojimo laikui produkto nenaudokite.

Užsakymo informacija

| Prekė | Pristatymo forma | Prekės Nr. |
|---------------------------------|---------------------------|------------|
| „rotasept®“-Int- 2 l buteliukas | 5 / kartoninėje dėžutėje | Paprašius |
| „rotasept®“ 100 ml | 15 / kartoninėje dėžutėje | Paprašius |
| „rotasept®“-Int- 5 l | 1 / kanistras | Paprašius |

Šie produktai parduodami ne kiekvienoje šalyje. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekiate su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Priedai

| Priedai | Prekės Nr. |
|--|------------|
| 5 ir 10 l bakelio atidarytuvas | 135810 |
| „schülke“ dozavimo pompa, 5 / 10 l (20 ml per taktą) | 117101 |
| „schülke“ čiapas, skirtas 5 / 10 l bakeliui | 135501 |

Informacija apie aplinką

„schülke“ produktus gamina ekonomiškų būdu ir taikydama modernius, saugus bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.schuelke.com.

Konkrečiais klausimais kreipkitės klientų aptarnavimo telefonu +49 40 52100-666 arba el. paštu info@schuelke.com



„Schulke & Mayr GmbH“ gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos narkotinių medžiagų teisės akto 13 skirsnio 1 dalimi ir GMP atitiktis sertifikatais, taikomais vaistams.

„schülke“ pagrindinė buveinė
„Schülke & Mayr GmbH“
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 (0) 40 - 52100 - 0
Faksas +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Igaliotas atstovas Lietuvoje:
UAB „APITERAPIJA“
Daugėlišio g. 32-301,
LT-09300 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 245 04 15
Faksas +370 5 270 62 01
El. p. info@apiterapija.lt